

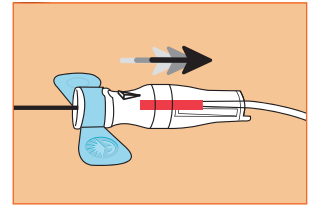


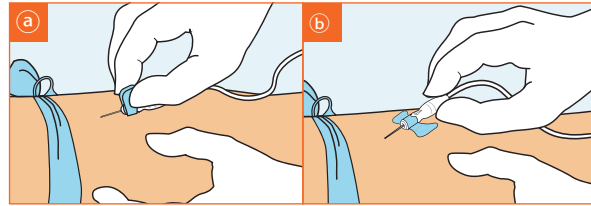

BD バキュテイナ®
プッシュボタン ブラッドコレクションセット
BD バキュテイナ®
プッシュボタン インフュージョンセット

- 指でボタンを押すだけで、簡単に安全機構が作動します
- 採血針が血管内にある状態で安全機構を作動させるので、抜針後の針刺し損傷を防止できます

指でボタンを押すだけの簡単操作

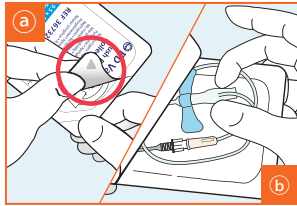




※この間、誤まってボタンを押さないよう注意してください。

- ① 包装に記された矢印部分から開封します。
② 本体を図のように指でつまんで取り出し、採血の場合は、ホルダーに接続します。
- ③ 針カバーをまっすぐ引いて取り外し、④ ⑤ いずれかの方法で穿刺します。
④ 親指と人差し指でウイング部を持ち穿刺します。
⑤ 本体部分を持ち穿刺します。

3. 採血の場合
血液のバックフローを確認します。

※輸液の場合
翼にテープを貼り、ラインを固定します。

ボタン部分にテープを貼らないようにし、輸液中にボタンを押さないよう注意してください。

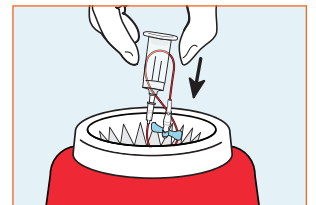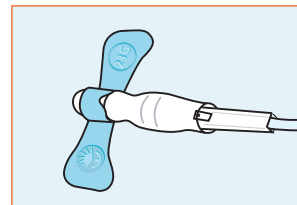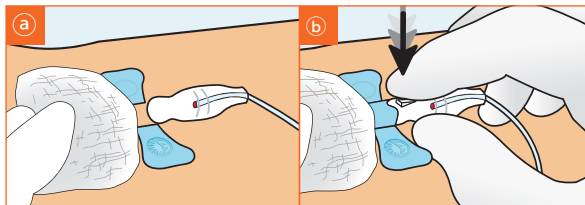

- ④ 採血または輸液後、滅菌ガーゼで穿刺部位を覆い、軽く押さえます。
⑤ 穿刺したままの状態では、本体を持ち、ボタン(本体上の▼部分)を押します。

5. 針が完全に本体に収納されたことを確認します。

6. 速やかに耐貫通性廃棄容器に廃棄します。採血の場合は、ホルダーから外さず一体のまま廃棄します。

※安全機構作動の妨げになるため、本体後方部分に触らないよう注意してください。

製品一覧表

BD バキュティナ® プッシュボタン ブラッドコレクションセット (採血用)

カタログ番号	カラー	針サイズ	付属チューブの長さ	ルアーアダプター	出荷単位
367344		21G 3/4	12インチ	有	50本/箱
367342		23G 3/4	12インチ	有	50本/箱

販売名: BD バキュティナ ブラッドコレクションセット 医療機器認証番号: 220AFBZX00064000

BD バキュティナ® プッシュボタン インフュージョンセット (輸液用)

カタログ番号	カラー	針サイズ	付属チューブの長さ	ルアーアダプター	出荷単位
367326		21G 3/4	12インチ	無	50本/箱
367324		23G 3/4	12インチ	無	50本/箱

販売名: BD プッシュボタン・インフュージョンセット 医療機器認証番号: 220AFBZX00229000

製造販売元

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地

本社: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX: 024-593-3281

bd.com/jp/

