

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 保護栓 70280000

プラグ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 組成
ポリプロピレン

* 2. 形状

本品は、国際規格に適合したルアーロックタイプのメスルアーに使用するキャップである。

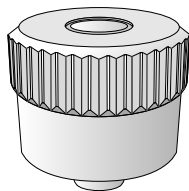

【使用目的又は効果】

(一般的名称定義)

用具の内容物の漏れを防止し、使用するまで内容物の無菌状態を維持するために用いるプラスチック製の蓋状の器具をいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 必要に応じて、あらかじめ手袋を着用する
2. 包装を開封し、包装内から製品を取り出す。
3. 接続するメスルアーに確実にねじ込む。

* 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) あらかじめ接合部に緩みがないことを確認してから使用すること。また、使用中は定期的に緩み、外れがないことを確認すること。
- 2) 使用時に緩みや液漏れ等が認められた場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 3) 過度な締め付けをしないこと。[キャップが外れなくなる又は、キャップが破損する可能性がある。]
- 4) 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して安全な方法で処分すること。
- 5) 使用中は本品の破損、接合部の緩み及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- 6) 接液部を汚染させないこと。
- 7) 本品を再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

〈有効期間〉

箱のラベル及び直接の被包記載の使用期限を参照。[自己認証による]

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

日本バクトン・ディッキンソン株式会社

TEL: 0120-8555-90 (カスタマーサービス)

外国製造業者:

ケアフュージョン 303 インク(CareFusion 303, Inc.)

国名: アメリカ合衆国